

# 【 吸引機本体配線方法 及び フットSW故障確認方法 】

## 【通常使用は(青矢印配線)】

- ① 吸引機本体からのコードをフットSWアダプターに接続後コンセントへ。  
(吸引機本体のメインSWは“ON”にしておきフットSWで“ON&OFF”します)

## 【フットSWが故障か確認(赤矢印配線)】

- ① 吸引機本体からのコードをフットSWアダプターに接続せずに直接コンセントへ。
- ② 本体メインSWで“ON&OFF”して動けば、吸引機本体は正常でフットSWの故障が考えられます。  
フットSWは当社でも取り扱っておりますが、お急ぎの場合は大手家電量販店又は大手ホームセンターでも入手出来るかと思います。  
(パナソニック まごの手式フットスイッチ)

