


カーボンブラシ交換図 (SB01-A 型)

吸引機本体が動かなくなった場合は、吸引機本体内部のモーターに付いているカーボンブラシの消耗が考えられますので下記の説明を参考にカーボンブラシを交換して下さい。

※ カーボンブラシを交換する前に下記の事項をチェックして下さい。


- ① 本体スイッチのON/OFF (吸引機本体側面に付いているスナップスイッチがONになっているか)
- ② フットスイッチの不良 (吸引機本体から出ている黒い電源コードを、フットスイッチを通さずに100Vのコンセントに直接差し込んで、吸引機本体が動けばフットスイッチの不良です)
- ③ ヒューズ切れ (吸引機本体側面に付いている15アンペアのヒューズが切れていないか?)

カーボンブラシを交換する場合は、必ず電源プラグを抜いてから作業を行って下さい。

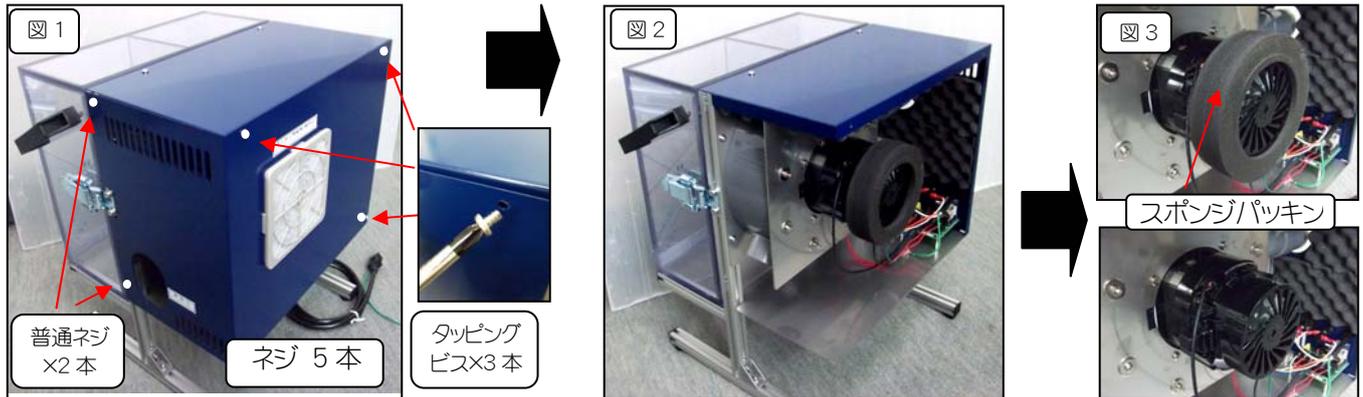


① (図 1)の5箇所ネジを外すと、L型のふた部分が取り外せて、モーター本体が見えてきます。(図 2)


② モーター本体の上部に付いているスポンジパッキンを取り外します。

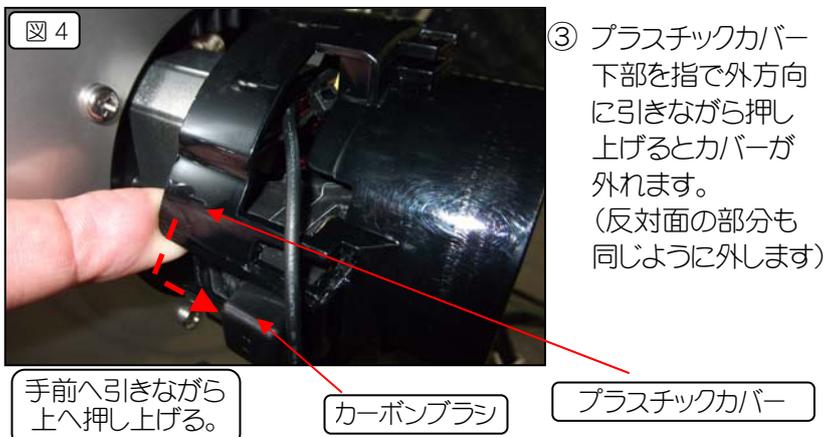

③ プラスチックカバー下部を指で外方向に引きながら押し上げるとカバーが外れます。(反対側の部分も同様に外します)

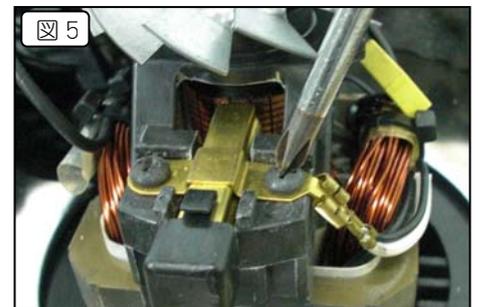

④ カーボンブラシを押えている金具を、+ドライバーを使用して緩めてカーボンブラシを外し交換して下さい。

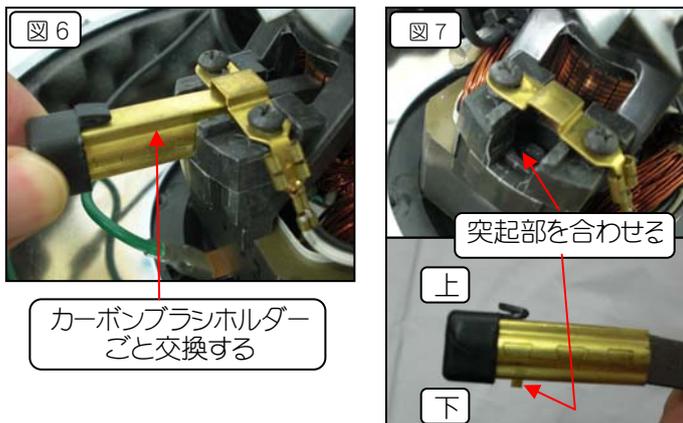

⑤ コードを挟まないように注意しながらプラスチックカバーを閉めます。

- ⑥ 図 3を参考に**必ず**スポンジパッキンを取り付けます。
- ⑦ 図 1を参考にL型のふたを取り付けます。